



**oak**  
masks

**OM5**  
protective mask



## TECHNINIŲ DOKUMENTŲ PREZENTACIJA: OM5 PROTECTIVE MASKS


### A. Gaminio aprašymas:

OM5 tipo kaukę, skirtą vartotojo kvėpavimo apsaugai, gamina UAB „Medicininis kaukių gamintojas“, įsteigta Topolių g. 2, Raudondvaris, Kauno rajonas, Lietuva (Gamintojas), laikantis Reglamente (ES) 2016/425 nurodytų bendrųjų sveikatos ir saugos reikalavimų, o jei konkrečiau, specifikacijų nurodytų Europos rekomendacijose dėl naudojimo numatytų PPE-R/02.075 2 versijoje, kaip III kategorijos AAP.

OM5 FFP2 respiratoriai (apsauginės veido kaukės) yra asmens apsaugos priemonės (AAP). Gamintojo gaminami OM5 FFP2 respiratoriai susideda iš penkių sluoksnių: 50 g. neausto audinio, dviejų sluoksnių 25 g. išpūsto lydyto audinio, 50 g. medvilnės neausto audinio, 25 g. neausto audinio. Gamintojo gaminami OM5 FFP2 respiratoriai turi reguliuojamą nosies spaustuką, kuris užtikrina individualų sandarumą bei elastingas ausies kilpas. OM5 FFP2 apsauginės kaukės yra minkštos, švelnios ir nedirgina odos.

Gamintojo OM5 FFP2 respiratoriai uždengia nosį, burną, smakrą ir neturi įkvėpimo ar iškvėpimo vožtuvo. Ši gamintojo gaminama kaukė yra geriausia asmens apsaugos priemonė siekiant apsisaugoti nuo COVID-19.

Padėtis	Sudėtis	Svoris	Kokybė
Pirmas sluoksnis	Neausta medžiaga	50 G	SSS
Antras sluoksnis	Pūstas lydytas audinys	25 G	PFE95 ar aukštesnis
Trečias sluoksnis	Pūstas lydytas audinys	25 G	PFE95 ar aukštesnis
Ketvirtas sluoksnis	Medvilnės neaustas audinys	50 G	ES100
Penktas sluoksnis	Neausta medžiaga	25 G	SSS
Nosies spaustukas	Nosies viela	4.2 * 1.1 * 0.55 CM	Dviguba viela
Ausų kilpos	Ausų gumelės	5 * 16 PIN	70D BARCODE + 70D NH3

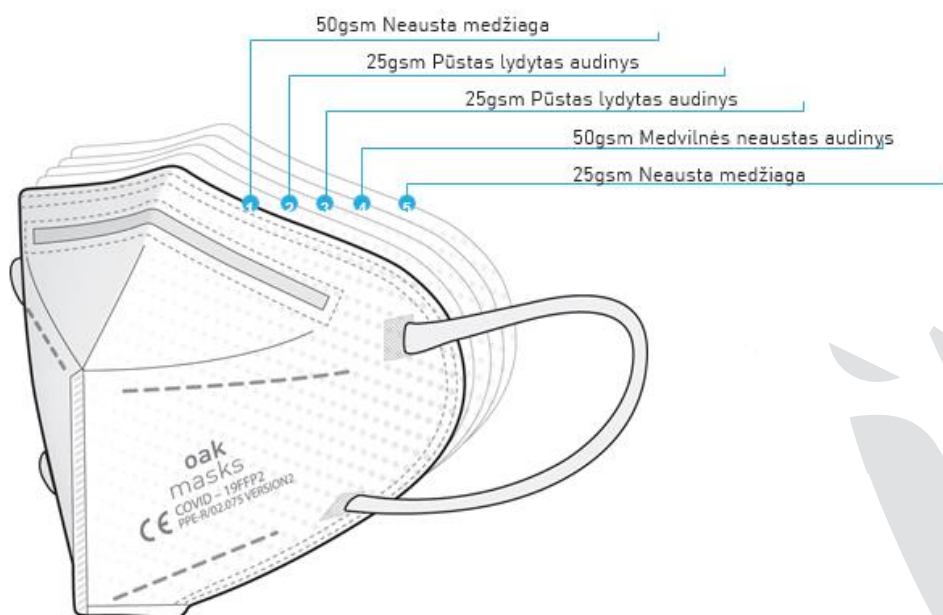



**oak  
masks**

**OM5**  
protective mask



#### **B. Gaminiui pritaikyti darnieji standartai:**

Šis produktas buvo pagamintas pritaikant Reglamentą (ES) 2016/425 bei PPE-R / 02.075 2 versijos standartą ir skirtas pagrindiniam naudojimui kaip kvėpavimo organų apsaugos priemonės - filtruojančios puskaukės, apsaugančios nuo dalelių. Reikalavimai, bandymai, ženklavimas atlikti laikantis AITEX, Plaza Emilio Sala 1, Alcoi, Ispanija, notifikuotosios įstaigos 0161 sertifikato Nr. 21/3779/00/0161.

#### **C. Ataskaitos testų atliktų su Gamintojo gaminiu;**

2021-01-20 AITEX tekstilės tyrimų institutas pateikė ataskaitas dėl filtruojančių puskaukių bandymų atlikimo pagal EN 149: 2001 + A1: 2009, remiantis Europos Komisijos greito bandymo rekomendacijomis Covid-19 situacijos, pagrįstos RFU 02.075-v. 02 pagal AITEX testavimo principą.

Bandymo ataskaitoje padaryta išvada, kad Gamintojo filtruojamos pusės kaukės atitinka AITEX bandymo principo 2 versijos reikalavimus kaukėms, skirtoms naudoti dėl Corona SARS-CoV-2 viruso pandemijos.

#### **D. Gamintojo gaminiui suteiktas sertifikatas:**

2021-01-21 Ispanijos tekstilės tyrimų instituto „AITEX“ sertifikavimo departamentas Gamintojo gaminamiems OM5 FFP2 respiratoriams suteikė sertifikatą Nr. 21/3779/00/0161, kuriuo „AITEX“ Ispanijos tekstilės tyrimų institutas, kaip notifikuotoji įstaiga Nr. 0161 patvirtino, kad Gamintojo gaminamos filtruojančios puskaukių techninė byla ir gaminys buvo patikrinti V priede aprašyta tvarka (Reglamentas (ES) 2016/425) ir nustatyta, kad jis atitinka reikalavimus. Nustatyta, kad produktas priklauso III kategorijai pagal reglamento I priedą.

#### **E. Gamintojo suteikiamos gaminio naudojimosi instrukcijos ir įspėjimai:**

##### **Naudojimosi instrukcijos:**

1. Prieš liečiant kaukę nusiplaukite rankas;;
2. Išimkite kaukę iš dėžutės, laikykite ją po smakru nosies spaustuku aukšty;
3. Užsitraukite ausų kilpeles už ausų bei įsitikinkite, kad jos tvirtai laikosi;
4. Pakoreguokite kaukę, kad įsitikintumėte, jog burna ir nosis yra visiškai uždengtos ir iš jos neišbėga oras;
5. Venkite liesti kaukę ją dėvėdami;
6. Siekdami nusiimti kaukę, po ausų kilpelėmis užkiškite pirštus ir nusiimkite kaukę.





# oak masks

**OM5**  
protective mask

CE  
0161



## Įspėjimai:

1. NETINKAMA naudoti kaukę atmosferoje, kurioje yra nuodingų dujų arba didelis užterštumas, arba atmosferose, kuriose deguonies kiekis yra mažiau nei 19,5 proc;
2. Jei naudojama kaukė tampa sugadinta, užteršta, nešvari, turi kvapą ar pasunkėja kvėpavimas su ja, palikite užterštą vietą ir nedelsdami pakeiskite kaukę;
3. NENAUDOKITE kaukes esant sprogiam orui ar arti ugnies šaltinio;
4. Panaudoję kaukę ją suplėšykite ir nedelsdami išmeskite į uždarytą vienkartinę dėžę, kad išvengtumėte pakartotinio naudojimo;
5. Netinkamai naudojant ir prižiūrint šį gaminį, galite susižeisti arba mirti;
6. Prieš naudojant kaukę visada patikrinkite jos galiojimo laiką;
7. Niekada nemodifikuokite kaukės;
8. Laikykite kaukes savo pakuotėje ir toli nuo saulės spindulių;

